


Korrekt pakning af kasse:

Kassen indeholder

- En fastmonteret skumbund med udstansninger til temperaturlogger og to prøvestativer
- En plasticpose
- En poselukker
- To stativer til prøverør

En dug af sugende materiale

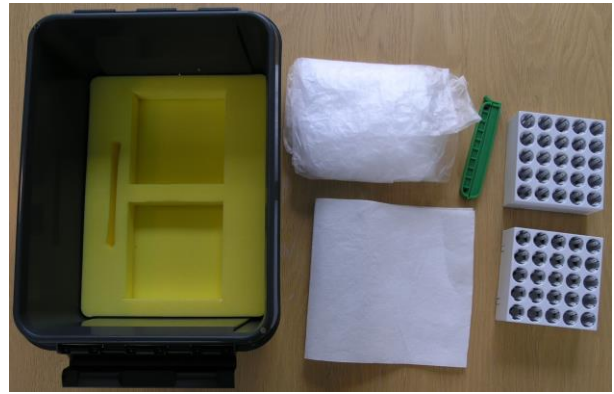

1. Beklæd den tomme kasse med plastikposen



2. Placer de to stativer til prøverør i udstansningerne – pas på ikke at beskadige posen



3. Placer den fugtsugende dug over prøverørene



4. Luk posen med poselukkeren



5. Placer PTB'erne øverst



6. Luk kassen

